

Stains for Resin Teeth

Charakterisieren von Kunststoffzähnen



Verarbeitungsanleitung
Instructions for Use
Mode d'emploi
Istruzioni d'uso
Instrucciones de uso
Gebruiksaanwijzing



Introducción

Estimado cliente

Tiene en sus manos un producto sanitario según RL 93/42/EWG. Introduzca en su ficha, inmediatamente después de la compra, el número de lote y el nombre del producto. Para cada trabajo realizado, anote los materiales utilizados con los números de lote. Para su seguridad, la de los pacientes y para el medio ambiente tenga en cuenta las indicaciones que figuran en estas instrucciones de uso.

Descripción de Stains for Resin Teeth:

Los maquillajes en pasta están especialmente indicados para su aplicación directa sobre la superficie de los dientes de resina. Mezclando los distintos colores pueden obtenerse las tonalidades deseadas. Para asegurar una óptima unión es imprescindible tratar previamente la superficie con el material Compositiv incluido en el surtido.

Descripción de Compositiv:

Compositiv es un material de unión micro relleno para la óptima unión de dos materiales distintos en prótesis.

Indicación:

- Caracterización de dientes de resina

Contraindicaciones:

- Modificación cromática de bordes incisales anteriores con fuerte carga protrusiva
- Reconstrucción de cúspides de trabajo en molares
- Caracterización de dientes de porcelana

Ventajas:

- Premezclados
- Presentación en forma de pasta
- Sencilla manipulación
- Multitud de tonos mediante mezcla de cada uno de los colores

Avisos

Stains for Resin Teeth no debe entrar en contacto con la piel, membranas mucosas u ojos. Stains for Resin Teeth sin polimerizar puede tener un ligero efecto irritante y puede provocar sensibilización frente a los metacrilatos. Los guantes médicos comerciales no proporcionan protección contra el efecto sensibilizante de los metacrilatos.

Advertencias:

Este material ha sido desarrollado para su uso dental y debe utilizarse según instrucciones de uso. El fabricante no se hace responsable de los daños que puedan producirse por su uso en otros campos o por una utilización inadecuada. Además, el usuario está obligado a comprobar, bajo su propia responsabilidad, antes de su uso, la idoneidad y campos de aplicación, sobre todo si no figuran en las instrucciones de uso.

Indicaciones sobre almacenamiento:

- Mantener fuera del alcance de los niños
- Cerrar las jeringas después de su uso (la luz puede provocar una prepolimerización)
- Seguir las indicaciones sobre almacenamiento y caducidad que figuran en el envase primario
- No utilizar el material una vez caducado
- Almacenar a temperatura ambiente 12–28 °C / 54–82 °F
- Proteger de los rayos solares y del calor

Margen de manipulación:

El margen de manipulación con una intensidad de luz de 3000 Lux. es de aprox. 3–5 minutos.

Inhalt/contents:

1 x Compositiv 2 ml
2 x Clear à 1ml
10 x Intensivfarben à 1 ml
1 x Verarbeitungsanleitung

Zusammensetzung/Composition:

Stains for Resin Teeth bestehen aus

> Dimethacrylate (47–48 Gew. %);
> Copolymer und Siliziumdioxide (49–50 Gew. %)
Zusätzlich enthalten sind Stabilisatoren, Katalysatoren und Pigmente (2–3 Gew. %)

Compositiv

> Dimethacrylate (71–72 Gew. %);
> Siliziumdioxid (16–17 Gew. %)
Zusätzlich enthalten sind Stabilisatoren, Katalysatoren und Pigmente (<2.5 Gew. %)

En nuestra pagina web www.candolor.com encontrará las hojas de datos de Seguridad.

Instrucciones



- 1 Repasado de la superficie**
En función de la edad del paciente será necesario repasar la superficie con fresas. Prestar atención para retirar la suficiente cantidad de sustancia para posteriormente volver a reconstruirla.



- 2 Tratamiento previo de la superficie**
Se limpia la superficie arenándola con óxido de aluminio a 2 bar de presión.



- 3 Limpiar**
No tocar la superficie ni limpiar con agua o vapor. La superficie debe estar libre de suciedad o grasa. Sobre la superficie limpia aplicar con un pincel monómero (p.e. Aesthetic autopolimerizable Candulor) y dejar actuar durante 2-3 minutos, de lo contrario se reduce considerablemente la unión.



- 4 Unión**
Para mejorar la unión del diente de resina con el maquillaje individual dispone de Candulor-Composiv. Aplicar Composiv directamente sobre la superficie de unión y mediante pincel distribuir uniformemente sobre la superficie. Mantener un grosor de capa de mín. 0,2 mm y máx. 0,5 mm.

Polimerización

La polimerización se realiza mediante aparato de luz durante 20 segundos por superficie o cuadrante



- 5 Caracterización individual**
Según necesidad, mezclar entre sí los maquillajes y / o modificar añadiendo Clear. Realizar las caracterizaciones deseadas sobre Composiv ya polimerizado.

Polimerización

Las superficies caracterizadas se polimerizan en aparato de luz durante 20 segundos por superficie o cuadrante. Controlar la total polimerización de las zonas en sombra, en caso contrario repetir la polimerización



- 6 Capa de Clear**
Para proteger las superficies caracterizadas y en caso necesario realizar correcciones de forma se aplica una capa de Clear (aprox. 0,1 mm - 0,3 mm).

Polimerización

Polimerizar la capa de Clear en aparato de luz durante 5 minutos por superficie o cuadrante



- 7 Repasado de las superficies polimerizadas**
En caso necesario, realizar las posibles modificaciones de forma con una fresa. Pulir la superficie con un pulidor de goma blando. Prepulir con un cepillo de pelo de cabra y pasta de pulir KMG. Pulir la superficie a alto brillo con un disco de pulir de cuero y pasta de pulir KMG.

Sobre una superficie repasada y con microrugosidades se puede depositar placa, para evitarlo, realizar el pulido con extrema precaución. No utilizar polvo de piedra pómez.

