

Estimado cliente:

Nos alegramos de que haya decidido comprar dientes de Candulor. Por favor lea la descripción del producto a continuación y familiarícese con las instrucciones.

Descripción del producto

Los dientes de Candulor abarcan una magnífica gama de formas y colores y pueden utilizarse para prótesis parciales y completas. Aunque se puede esperar un procesado absolutamente seguro de los dientes queremos facilitarle una aplicación idónea de nuestros dientes de Candulor mediante las siguientes sugerencias.

Instrucciones de procesado de dientes de plástico y cerámica de Candulor

- Evite que se produzca calor durante el limado de los dientes de cerámica o material compuesto (NFC).
- No aspire el polvo producido durante el limado.
- Después de colocar las prótesis cueza limpiamente las mitades de las cubetas.
- Limpie los dientes eliminando restos de cera y mantenga la superficie libre de grasa.
- Carde los dientes de plástico en la parte del cuello con una fresadora o con una piedra abrasiva.
- Si al limar se ha eliminado el estrato de PMMA de los dientes de material compuesto (NFC) hay que aplicar el mediador de adherencia Composiv de Candulor.
- Antes de tupir los dientes cardados, rocíelos con monómero.
- En ningún caso los dientes deben entrar en contacto con el líquido aislante.
- Aísle la superficie de yeso ligeramente húmeda y a la temperatura de la mano dos veces con Iso-K (según las instrucciones de procesado de Iso-K de Candulor AG).
- Al procesar materiales para prótesis, cumpla las instrucciones de procesado del fabricante.

Candulor AG	Subsidiary: Candulor Dental GmbH	Subsidiary: Candulor USA Inc.
CH-8602 Wangen/ZH, Pünten 4, Postfach 89	D-78239 Rielasingen-Worblingen, Am Riederngraben 6	7462 N. Figueroa St., Suite 104, Los Angeles CA 90041
Tel. +41 (0)44 805 90 00, Fax +41 (0)44 805 90 90	Tel. +49 (0)7731 79 783-0, Fax +49 (0)7731 28 917	Phone +1 (323) 254-1430, +1 (310) 659-7102,
www.candulor.com , candulor@candulor.ch	www.candulor.de , info@candulor.de	Phone +1 800 436-3827, Fax +1 (310) 659-7136
		www.candulor.us , info@candulor.us



Caracterización de dientes de plástico y de cerámica

- Para caracterizar dientes de cerámica y de plástico dispone de los siguientes productos de Candulor:

Caracterización de dientes de plástico con Stains for Resin Teeth.

Caracterización de dientes de cerámica con Stains for Porcelain Teeth.

- PhysioStar® NFC
- Condyliform® II NFC
- PhysioSet TCR Resin
- Bonartic TCR Resin
- Preference®

- PhysioSet CT Porcelain
- Bonartic CT Porcelain
- Condyliform® CT Porcelain
- AutoCentric

Los materiales han sido desarrollados para su uso dental y deben manipularse según las instrucciones de uso. El fabricante no se hace responsable de los daños ocasionados por otros usos o una manipulación indebida. Además, el usuario está obligado a comprobar bajo su propia responsabilidad, antes de su uso, si el material es apto para los fines previstos, sobre todo si éstos no figuran en las instrucciones de uso.

En nuestra pagina web www.candulor.com encontrar las hojas de datos de Seguridad.

04/2008 REV.01

Candulor AG CH-8602 Wangen/ZH, Pünten 4, Postfach 89 Tel. +41 (0)44 805 90 00, Fax +41 (0)44 805 90 90 www.candulor.com , candulor@candulor.ch	Subsidiary: Candulor Dental GmbH D-78239 Rielasingen-Worblingen, Am Riederngraben 6 Tel. +49 (0)7731 79 783-0, Fax +49 (0)7731 28 917 www.candulor.de , info@candulor.de	Subsidiary: Candulor USA Inc. 7462 N. Figueroa St., Suite 104, Los Angeles CA 90041 Phone +1 (323) 254-1430, +1 (310) 659-7102, Phone +1 800 436-3827, Fax +1 (310) 659-7136 www.candulor.us , info@candulor.us
--	---	---